

ARJO

MIRANTI

CAMILLA GRÚA DE BAÑO





FUERZA MIRANTI SUSTITUYENDO FUERZA MUSCULAR

El baño crea una sensación de bienestar. Sus beneficios para el cuerpo y la mente han sido disfrutados desde tiempos inmemoriales y hoy en día el baño constituye una parte primordial en el programa de movilización de residentes. La camilla grúa de baño *Miranti* ofrece un nivel insuperable de cuidado asistido por motor además de establecer nuevas normativas referentes a un manejo ergonómico con poco esfuerzo así como confort y seguridad para el residente. Un conjunto de dos baterías de cambio rápido suministra la energía para las funciones clave siguientes: manejo motorizado, elevación / bajada de residente en la camilla, respaldo motorizado y frenos centralizados. Utilizando la *Miranti*, un solo cuidador puede hacerse cargo de un residente dependiente durante el ciclo completo del baño. El residente es recogido directamente de la cama y transportado hasta el baño y luego de vuelta a la cama, sin necesidad de levantamientos o transferencias manuales.

La *Miranti* se integra en los baños ARJO de 1900 mm y mayores, lo cual significa que el residente puede permanecer con comodidad y seguridad en la camilla durante el transporte y el baño, lo cual hace que el todo el procedimiento sea más eficaz y menos estresante tanto para el cuidador como para el residente.

Con la *Miranti*, un solo enfermero puede recoger el residente de la cama y llevarle directamente al baño. El procedimiento completo requiere un esfuerzo mínimo absoluto gracias a las funciones motorizadas de la *Miranti* a saber: manejo motorizado, elevación / bajada motorizada de la camilla y respaldo motorizado.



RECLINARSE Y RELAJARSE:

El cojín de soporte de muslos, apoyacabezas de ranuras múltiples y el respaldo motorizado pueden ser ajustados para confort individual. El manejo motorizado ofrece al cuidador control pleno y fácil control de la camilla en todo momento durante el transporte.

RESPALDO MOTORIZADO:

El respaldo de la *Miranti* puede elevarse / bajarse a motor, con lo cual se elimina la de otro modo pesada tarea de ajustar manualmente el respaldo. Esta tarea se lleva a cabo ahora simplemente pulsando un botón. Para elevar el respaldo, simplemente pulse el botón adecuado en el mando.



ASEGURANDO CONFORT DURANTE EL MOVIMIENTO

El manejo motorizado, combinado con ergonómicos asideros, facilita la utilización de la *Miranti* gracias a una conducción más uniforme, mejor maniobrabilidad y círculos de rotación más ceñidos. El manejo motorizado ahorra al cuidador el esfuerzo de empujar la camilla al tiempo que asegura al residente un transporte suave y controlado. Un botón pulsador integrado en las asas de conducción situadas en el cabezal activa el manejo motorizado. Al soltar el botón, la camilla se detiene de

manera rápida y uniforme. El apoyacabezas de ranuras múltiples encaja firmemente en el cabezal y ofrece cuatro posiciones alternativas. Para mayor comodidad de la parte inferior del cuerpo, se dispone en la camilla un cojín de soporte de muslos que permanecerá en su sitio, incluso durante el baño.

El residente permanece seguro en la camilla gracias a un asidero de seguridad y protección lateral integrados que simplemente se encaja en su sitio en medio de la camilla.



RESPALDO MOTORIZADO

El respaldo motorizado es regulado mediante el mando y es elevado / bajado desde el cabezal de pilar lateral. Para cambiar el cabezal de la camilla simplemente mueva el gancho de un lado al otro.



ASIDERO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LATERAL

El residente se siente seguro y relajado sujetando el asidero de seguridad, mientras que la protección lateral triangular evita que el residente se caiga de la camilla.



ASIDEROS ERGONÓMICOS

Las asas especialmente diseñadas incluidas en el cabezal (para la conducción) y el pilar (para el manejo al lado de la cama / baño) ofrecen al cuidador pleno control.



FRENO

El sistema de freno centralizado es regulado mediante el control de mano o pulsando un botón en el pilar. El cuidador puede aplicar los frenos centralmente y vigilar al residente al mismo tiempo, en lugar de tener que aplicar cada freno por turno.



TRANSMISIÓN MOTORIZADA (OPCIONAL)

La transmisión motorizada comprende una quinta rueda que ayuda al cuidador cuando conduce la camilla hacia delante, controlado mediante un botón pulsador situado en el asa de conducción. Al soltar el botón, la rueda detiene su giro pero permanece en contacto con el suelo durante cuatro segundos, lo cual facilita el giro de la camilla sobre su propio eje. Esto es particularmente útil cuando se hacen giros en los pasillos, dentro de las salas, etc.



DISEÑO ERGONÓMICO Y FÁCIL MANEJO

La *Miranti* es fácil de conducir, girar, posicionar y frenar por un solo cuidador. El cuidador evita transferencias manuales porque la *Miranti* realiza todo el levantamiento y la camilla puede ajustarse en cualquier momento a la altura de trabajo ergonómicamente correcta. Cada extremo de la camilla puede ser usado como cabezal, lo cual hace posible recoger al residente desde cualquier lado de la cama. Simplemente mueva el apoyacabezas de ranuras múltiples y acople en gancho para elevar el extremo que será el respaldo.

El respaldo motorizado, freno centralizado y elevación / bajada de camilla son regulados desde el mando, de

modo que el cuidador siempre está en la posición óptima para asistir al residente.

El pilar lateral permite realizar una eficaz transferencia longitudinal desde la cama. Ajuste la altura de la camilla a la altura de la cama y luego vuelva suavemente al residente para disponerlo sobre la misma. Para elevar el respaldo, simplemente pulse el botón adecuado en el mando.

La *Miranti* ha sido diseñada desde el principio para facilitar su manejo al cuidador. El conjunto de puesta en marcha ARJO contiene un vídeo y un manual de instrucciones intuitivas para que el personal pueda utilizar el equipo con confianza.



CUIDADO INDIVIDUALIZADO DE ALTA CALIDAD

La *Miranti* facilita el baño individualizado de residentes dependientes. Para el residente, el ser bañado por un solo cuidador resulta menos estresante e indiscreto que el ser bañado por un grupo de cuidadores. Potentes funciones de apoyo, diseño ergonómico, fácil manejo y simples características de confort y seguridad generan confianza en el sistema tanto para el cuidador como para el residente. El cuidador tiene un mejor entorno de

trabajo y el residente puede relajarse, disfrutar dentro de la caba y beneficiarse del baño.

La *Miranti* ha sido construida para uso intensivo. El sistema de baterías recargables significa que siempre está lista para ser puesta en servicio. El ahorro de tiempo permite bañar a más residentes y el personal que de otro modo tendría que ayudar a otro cuidador en el ciclo del baño queda libre para realizar otras tareas.



MEJOR CALIDAD DE VIDA

La construcción de una sola pieza de la *Miranti* ofrece grandes beneficios higiénicos. Este sencillo concepto facilita y acelera las tareas de limpieza. Todas las superficies son fácilmente accesibles con lo cual se minimiza el riesgo del cruce de infecciones y de sus costosas consecuencias. La estabilidad de la camilla es extraordinaria gracias a la excelente distribución del peso del chasis en forma de "V".

Al lado del baño o de la cama, el sistema de freno centralizado asegura que la *Miranti* permanezca firme como una roca durante las rutinas de trabajo. Para mayor seguridad, una luz amarilla en el panel de control indica que el freno está aplicado. La *Miranti* también puede ser utilizada para pesar a pacientes con la sumamente precisa báscula electrónica integrada opcional. Se facilita la tarea de pesar al paciente.

Se ahorra tiempo y esfuerzo. Las eficaces funciones y características de la *Miranti* ofrecen al cuidador más tiempo para atender al residente y permitirle disfrutar los beneficios del baño.



INTEGRACIÓN EN SISTEMA

Como parte de un sistema de baño integrado, la *Miranti* elimina las transferencias manuales y el pesado levantamiento, con lo cual se minimiza el riesgo de lesiones y esfuerzo para el cuidador.



DUCHA DESPUÉS DEL BAÑO

El residente puede ser duchado y secado con facilidad después del baño regulando la camilla a una altura adecuada sobre la cuba.



BÁSCULA INTEGRADA:

El pesar al residente en la *Miranti* es simple, utilizando la sumamente precisa báscula electrónica totalmente integrada.



POTENCIA DOBLE

El sistema de baterías recargables incluye dos baterías y un cargador. Simplemente encaje la batería extra del cargador para asegurar que la *Miranti* esté siempre lista para ser utilizada.




FACILIDAD DE LIMPIEZA

La construcción de una pieza y las superficies lisas de la *Miranti* hacen que sea higiénica y fácil de limpiar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Espacio requerido

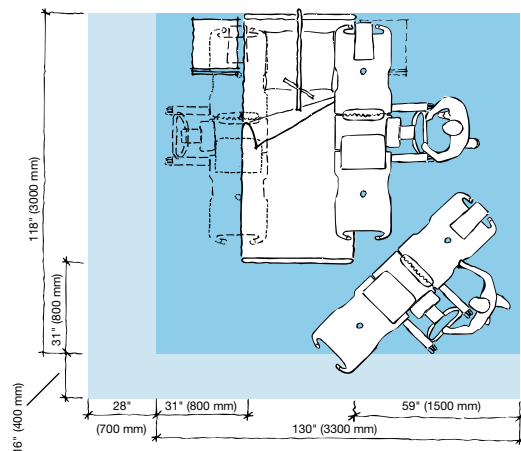


El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.

El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

Galería de Residentes

Apto para Doris y Emma

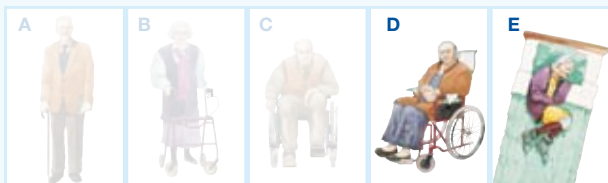

D Doris, incapaz de sostenerse en pie por sí misma.

E Emma, encamada y totalmente dependiente.

Contactar con ARJO para más información sobre la Galería de residentes™.

Información sobre el producto

Capacidad de levantamiento	160 kg
Peso con transmisión motorizada	103 kg
Máximo peso total (grúa + residente)	263 kg
Máximo ancho de chasis	940 mm
Ancho entre las patas del chasis	385 mm
Espacio libre debajo del chasis	30 mm
Máxima longitud del chasis (incluidos frenos)	850 mm
Radio de giro	Ø 1150 mm
Rango de elevación en una carrera	585 mm
Suministro de voltaje	24 V c.c.
Potencia máxima	150 VA
Batería	Hermética plomo-ácido NDA 0100-03
Color	azul / gris
Altura de asiento, posición más baja	450 mm
Altura de asiento, posición más alta	1.035 mm
Altura de grúa, máx.	1.805 mm
Altura de grúa, mín.	1.220 mm

Aprobaciones

Marca CE a través de TÜV

ARJO recomienda encarecidamente usar solamente piezas designadas por la empresa ARJO, las cuales han sido diseñadas para el propósito específico, en los equipos y demás aparatos suministrados por ARJO, con el fin de evitar lesiones atribuibles al uso de piezas inadecuadas. Las condiciones de venta de ARJO estipulan específicamente y confirman que no asume responsabilidad legal en dichas circunstancias. Nuestra política es de desarrollo continuo, y por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Miranti y Galería de Residentes son marcas registradas pertenecientes a Arjo International AG.



FM 24321
ISO 9001 • BS 5750 Part 1 • EN 29001
Arjo Hospital Equipment AB, Sweden

ARJO

...pensando en las personas.

Arjo Spain, S.A.

Teléf: 902 300 126

Fax: 902 300 191

e-mail: arjospain@arjospain.es

www.arjo.com

MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE