

ARJO

**SOLUCIONES DE SLINGS
PARA CADA NECESIDAD**



EL NIVEL DE CONFORT DE LA GRÚA DEPENDE DEL SLING

ARJO se centra en mejorar el manejo del paciente al ofrecerle el sling óptimo para satisfacer sus necesidades específicas. La selección del sling correcto es vital a fin de asegurar una transferencia segura y cómoda para aquellos residentes o pacientes con movilidad insuficiente.

Ofrecemos una gama completa de slings para satisfacer las necesidades de todos los centros de cuidado. Además le ayudaremos a identificar la combinación de sujeción de sling, tamaño, estilo, características especiales y material que se adapte a su evaluación de las necesidades de sus pacientes. La nueva guía del usuario de slings ARJO se ofrece ahora disponible en DVD.

ARJO ofrece slings de clip y de bucle. Los slings de clips, utilizados con nuestros bastidores de cuatro puntos (DPS), se basan en un sistema de sujeción desarrollado y testado por ARJO. Los slings de clips pueden ser utilizados en combinación con bastidores para bucles.

La gama de tamaños de slings abarca el rango

completo de pacientes, desde los pediátricos hasta los bariátricos. Nuestra cinta métrica y la codificación con colores les ayudarán a identificar el tamaño correcto de sling.

Además de los slings de serie, ARJO ha desarrollado los Flites, slings desechables adecuados a pacientes específicos que los llevan durante toda su estancia en el hospital.

ARJO también ofrece slings para camillas de una sola pieza que pueden utilizarse para pacientes que requieren pleno soporte corporal en posición tumbada durante los traslados.

También satisfacemos solicitudes de diseño especiales que requieren la personalización de slings a través de nuestro Servicio de confección de slings a medida.

La calidad de los slings ARJO es asegurada mediante la prueba individual de cada uno de ellos, incluida la prueba de carga a 1,25 veces la carga de trabajo máxima.





SLINGS DE CLIPS

Slings para todo uso

Los slings de clips para todo uso ofrecen buen confort y soporte en una gama de tareas de manejo diario de pacientes, tales como las relacionadas con traslados de cama a silla. El sling de clips de 4 puntos mejora el confort al distribuir más uniformemente el peso del residente sobre la superficie del sling. Los slings de clips se utilizan en combinación con bastidores DPS (Sistema de Posicionamiento Dinámico), un sistema que permite al enfermero o cuidador disponer el residente o paciente en el sling, ya sea en posición erguida o bien recostada, con el mínimo esfuerzo físico.

- El sling sin acolchado es el utilizado habitualmente. No lleva acolchado en la zona de las piernas, y es más fácil de colocar en aquellos residentes que sufren afecciones óseas o en la columna vertebral.
- El sling reforzado mejora el confort de los pacientes, debido al acolchado adicional en la zona de las piernas.
- El sling de malla permite que el agua pase fácilmente a través del sling, lo cual hace que sea ideal para utilizarlo en el baño o la ducha.
- El sling "All-day" hecho de material transpirable en color negro, es apto para usarlo con pacientes que permanecen en el sling durante largos periodos de tiempo
- El sling "All-day" de malla es adecuado para pacientes que permanecen en una silla de ruedas durante largos periodos de tiempo, y además satisface sus necesidades en el baño y la ducha.
- El sling Comfort Deluxe ofrece un sumamente elevado nivel de confort en áreas sometidas a presión tales como las piernas y los hombros debido a que no hay fijación ni acolchado adicionales.



Sling de malla



Sling All-day (para todo el día)



Sling de malla All-day (para todo el día)



Sling Comfort Deluxe



Sling para el inodoro



Sling para amputados



Sling pediátrico

Slings para el inodoro

Nuestro sling para el inodoro con apoyacabezas está diseñado especialmente para ayudar al paciente a desnudarse, vestirse y en las tareas del inodoro.

- Este diseño asegura un acceso eficaz para que las tareas de desnudar, vestir al paciente y cuando acude al inodoro sean realizadas de manera decorosa.
- Los soportes para las piernas del sling están acolchados para mayor comodidad, pero son estrechos para facilitar las tareas de desnudar y vestir al paciente.
- El brazo acolchado del sling brinda al paciente confort y soporte.
- Será necesaria una evaluación detallada del paciente antes de utilizar este sling.

Slings para amputados

Estos slings están diseñados para satisfacer las necesidades de soporte y confort especiales de pacientes amputados de una o de dos piernas.

- El sling de doble amputado (por encima de la rodilla o hasta la cadera)
- El sling para amputados de pierna derecha es para pacientes amputados de pierna izquierda (por debajo o por encima de la rodilla o hasta la cadera).
- El sling para amputados de pierna izquierda es para pacientes amputados de pierna derecha (por debajo o por encima de la rodilla o hasta la cadera).
- Los slings de malla para amputados están diseñados para la ducha o el baño.
- El sling de Velcro es para pacientes amputados de las dos piernas (sobre o por debajo de la rodilla) y se coloca igual que un sling normal, sin necesidad de que el paciente tenga que girar sobre si mismo.

Slings pediátricos

Cada aspecto de este sling pediátrico para todo uso ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los niños.

- El acolchado se dispone para ofrecer confort adicional en el área de las piernas y también ayuda a prevenir que el material se enrosque y se arrugue debajo de las piernas.
- El material de poliéster del sling ha sido específicamente diseñado para pacientes pediátricos.
- Para incrementar su atractivo a los niños, el sling está decorado con un patrón de elefantes estampados.



Sling pediátrico (arriba)
y sling de clips acolchado.

SLINGS DE BUCLES



Sin apoyacabezas

Slings para todo uso

Los slings de bucles para todo uso están diseñados para las tareas de manejo diario de pacientes, tales como las relacionadas con traslados de cama a silla.

- El sling acolchado con apoyacabezas incluye acolchado en el área de las piernas, es más cómodo y ayuda a prevenir que el material se enrolle o arrugue debajo de las piernas del paciente.
- Los pacientes con estabilidad en el torso y en la cabeza pueden ser trasladados de manera segura y cómoda en un sling acolchado sin apoyacabezas.
- Un sling de malla con bucles es adecuado para el baño y la ducha.



Slings de colocación rápida

Como en nombre sugiere, este sling se coloca con facilidad y rapidez.

- Los slings de colocación rápida ofrecen un diseño mas bajo de espalda.
- El diseño hace que éste sea el sling adecuado en casos donde los brazos del paciente deben colocarse fuera del sling, debido a una afección médica o preferencia personal.



Sling de colocación rápida

Slings para uso en el inodoro

Estos slings de bucle están diseñados específicamente para uso el inodoro y para desnudas / vestir a los pacientes.

- El brazo acolchado del sling brinda confort y soporte.
- Los soportes para las piernas están acolchados para mayor comodidad, pero son estrechos para facilitar las tareas de desnudar y vestir al paciente.
- La selección del sling de inodoro correcto, el cual se ofrece disponible con o sin apoyacabezas, se determina estudiando detenidamente la estabilidad de la cabeza y el torso del paciente.
- El sling de inodoro con apoyacabezas también puede incorporar un cinturón de seguridad alrededor de la parte superior del cuerpo para mayor seguridad.



Sling para inodoro (también disponible con apoyacabezas)

Slings tipo hamaca

Aunque el sling tipo hamaca es adecuado para la mayoría de los pacientes, resulta particularmente útil cruzando las secciones de piernas, para elevar amputados simples o dobles o para aportar soporte adicional a pacientes especialmente sensibles a la presión.

- Los slings tipo hamaca están provistos de apoyacabezas. La selección se determina estudiando detenidamente la estabilidad de la cabeza y el torso del paciente.




Sling tipo hamaca




Sling tipo hamaca


SLING PARA USO BARIÁTRICO

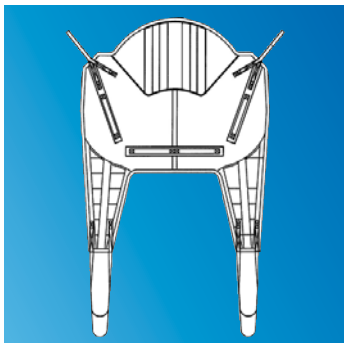

Gama básica/de lujo

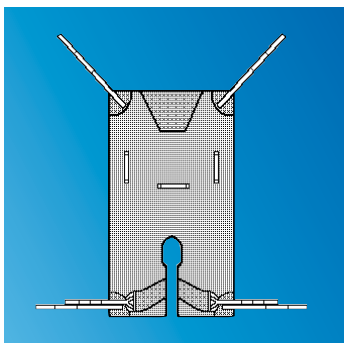

La gama de hamacas de lujo de pierna dividida

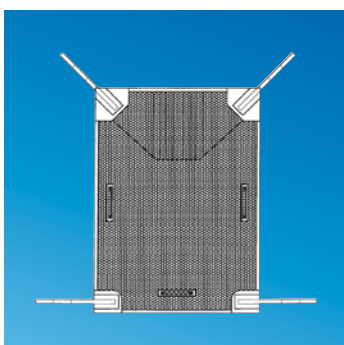

La gama de hamacas básica

Los slings bariátricos ARJO están diseñados para ser usados con la grúa móvil *Tenor* de ARJO y el sistema de levantamiento de techo *Maxi Sky¹⁰⁰⁰* de ARJO. Las diferentes formas corporales de los pacientes bariátricos requieren diferentes diseños de sling, por lo que ARJO ha desarrollado una gama de tipos de sling en cuatro tamaños bariátricos a fin de satisfacer estas diversas necesidades. Será necesaria una evaluación del paciente que incluya su peso, forma corporal e individual para seleccionar un tipo de sling que asegure el máximo confort y seguridad.

La gama básica

ofrece la misma forma y diseño a un precio más reducido. Incorpora un relleno estándar en las piernas sin material ni cosido reforzado. El confort y la seguridad siguen siendo la principal prioridad.

La gama de lujo

ofrece material reforzado y puntadas en las áreas sujetas a más presión del sling incluidos los hombros, las piernas y la columna vertebral. El acolchado adicional aporta más confort y menos presión sobre piel delicada y refuerzo en las secciones de piernas para prevenir enrollamientos y mejorar el confort del paciente.

La gama de hamacas de lujo de pierna dividida

se selecciona a veces para pacientes con cuerpo en forma de pera. El estómago de estos pacientes es más prominente y requieren más soporte. El sling completo está acolchado con tela espaciadora más suave que dispersa el calor y previene la formación de sudor y calor corporal, para mayor confort y protección de la piel del paciente. La gama de hamacas básica tiene el mismo diseño que la gama de lujo, pero sin la facilidad de pierna dividida. El material de coste más bajo aporta una solución más económica.

SLINGS DE ELEVACIÓN HORIZONTAL

Además de los slings normales, ARJO también suministra sling de camilla blanda o elevación horizontal. Este sling de una pieza se usa en conjunción con un bastidor de camilla. El sling de elevación horizontal está diseñado para ser usado con pacientes que requieren pleno soporte en posición tendida durante los traslados.

- Disponible con o sin abertura para el orinal, en tela normal o de malla o en la versión *Flite* (de uso particular del paciente).




Sling de elevación horizontal con abertura para el orinal

SLINGS DESECHABLES DE USO PARTICULAR – PROTEGEN A ENFERMEROS Y PACIENTES

Los *Flites* de ARJO representan un revolucionario concepto de sling inventado por ARJO, diseñado para hacer frente a los desafíos de los entornos hospitalarios y de cuidados intensivos actuales. Los *Flites* son slings desechables de uso particular diseñados para ser llevados por el paciente durante su estancia en el hospital y que facilitan las tareas de levantamiento de manera segura, higiénica y cómoda.

- Para el personal enfermero y cuidador, los *Flites* están siempre disponibles; no se pierde el tiempo buscando o pidiendo prestado un sling. No es necesario utilizar el servicio de lavandería ni preocuparse por si se pierden o estropean los slings. La máxima disponibilidad de los slings significa que las grúas de sling pueden ser usadas la mayor cantidad de tiempo posible para evitar todo el levantamiento manual.
- Los *Flites* de ARJO han sido diseñados para ofrecer extremada seguridad y rentabilidad como un elemento esencial de cualquier programa de manejo seguro. Cada uno de los *Flite* es sometido a pruebas para brindar la máxima seguridad al paciente, tranquilidad al cuidador y rentabilidad por lo pagado.
- Son posibles dos modos de sujeción, el sistema de clips ARJO o los *Flites* de bucles que se sujetan con facilidad a las grúas de sling de bucles y en los centros de cuidado se usan todavía los modelos antiguos.
- Como artículos de consumo, los *Flites* ofrecen protección contra los riesgos de infección cruzada.
- Cuando el paciente abandona el del hospital o el sling *Flite* se ensucia, no es necesario lavarlo sino que se desecha y se usa otro nuevo.
- En la gama de *Flites* también se incluyen slings de elevación horizontal.

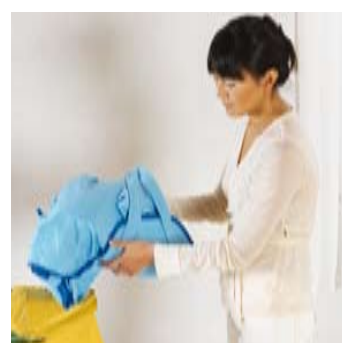

NUESTRAS GRÚAS TRANSPORTAN CARGAS SUMAMENTE VALIOSAS



Para cerciorarnos de que ofrecen la máxima seguridad y protección, cada uno de los slings que fabricamos es sometido a pruebas manuales en una instalación experimental construida al efecto. Nuestros slings son sometidos a pruebas de hasta 1,25 de la máxima carga de trabajo asegurada - superior a los requisitos de prueba oficiales.

SLINGS CONFECCIONADOS A MEDIDA



Aunque la gama de slings normal satisface muchas necesidades de los pacientes, reconocemos que factores individuales tales como la altura, la distribución del peso y la condición física del paciente pueden requerir un sling confeccionado a medida. ARJO tiene la pericia necesaria para modificar todos los aspectos de sus slings, materiales, tamaños y características especiales, a fin de crear un producto final óptimo para un paciente determinado. El *Servicio de slings confeccionados a medida* ya ha diseñado más de 2.000 slings personalizados.



Guía del Usuario de Slings ARJO

Todos lo que necesita saber entorno a los slings ARJO se incluye ahora en un disco. Para ayudarle a seleccionar el sling óptimo para cada paciente, ARJO ha producido un software fácil de navegar con secuencias de vídeo graduales que muestran cómo aplicar los diversos slings en diferentes situaciones de manejo de pacientes.

MATERIALES DE SLING



Poliéster normal

Tela para todo uso


- Disponibles dentro de la gama completa de slings ARJO normales
- Lavado a máxima temperatura de 90°C
- Secado en máquina a baja temperatura
- Azul claro



Malla de poliéster normal

Tela para el baño y la ducha

- Disponibles dentro de la gama completa de slings ARJO normales
- Lavado a máxima temperatura de 90°C
- Secado en máquina a baja temperatura
- Azul claro

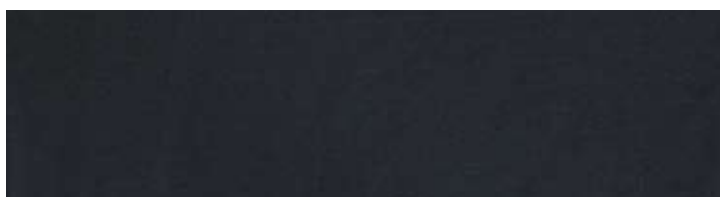

Poliéster normal para todo el día

Puede dejarse debajo del residente

- Disponible dentro de la gama de slings sin acolchar y para amputados de las dos piernas ARJO (tamaños XS-LL)
- Lavado a máxima temperatura de 90°C y secado en máquina a baja temperatura
- Negro



Malla de poliéster para todo el día

Puede dejarse debajo del residente

- Disponible dentro de la gama de slings sin acolchar y para amputados de las dos piernas ARJO (tamaños XS-LL)
- Lavado a máxima temperatura de 90°C y secado en máquina a baja temperatura
- Negro



Poliéster Comfort DeLuxe

Tela suave para confort adicional

- Disponible dentro de la gama de slings acolchados ARJO
- Lavado a máxima temperatura de 90°C
- Secado en máquina a baja temperatura
- Azul marino



Poliéster pediátrico

Diseñado específicamente para pediatría

- Disponibles en los tamaños XXS, XS y S
- Lavado a máxima temperatura de 90°C
- Secado en máquina a baja temperatura
- Azul claro con elefantes estampados

TAMAÑOS DE SLING

	Tamaño	Color	Pesos	
Pediátricos	XXS		Anis	0-25 kg
	XS		Marrón	25-35 kg
	S		Rojo	35-60 kg
Adultos	M		Amarillo	55-75 kg
	L		Verde	70-120 kg
	LL		Morado	100-160 kg
	XL		Azul	140-200 kg
	XXL		Terracota	200-228 kg
Bariátricos	Bariatric M		Amarillo/gris oscuro	160-210 kg
	Bariatric L		Verde/gris oscuro	210-250 kg
	Bariatric XL		Azul/gris oscuro	230-340 kg
	Bariatric XXL		Terracota/gris oscuro	318-455 kg

ARJO facilita la selección de tamaños y slings con su sistema de codificación por colores. Los tamaños de sling que satisfacen las necesidades pediátricas, adultas y bariátricas tiene cada uno un código de color distintivo visible en el borde de los slings ARJO.

Cinta de medir



La medición de la altura del paciente, además de su peso, es una parte importante para determinar el tamaño de sling óptimo para pacientes determinados. La práctica cinta de medir ARJO facilita el dimensionado del sling.

ARJO recomienda encarecidamente usar solamente piezas designadas por la empresa ARJO, las cuales han sido diseñadas para el propósito específico, en los equipos y demás aparatos suministrados por ARJO, con el fin de evitar lesiones atribuibles al uso de piezas inadecuadas. Las condiciones de venta de ARJO estipulan específicamente y confirman que no asume responsabilidad legal en dichas circunstancias. Nuestra política es de desarrollo continuo, y por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Flites, Maxi Sky[®], Tailor Made Slings y Tenor son marcas registradas pertenecientes a Arjo International AG.

ARJO ...pensando en las personas.

Arjo Spain, S.A.
 Teléf: 902 300 126
 Fax: 902 300 191
 e-mail: arjospain@arjospain.es
 www.arjo.com